

# Plum Augenspül-Notfallstation

plum



Marke: PLUM

## PRODUKTBESCHREIBUNG für Plum Augenspül-Notfallstation

Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 500 ml Augenspülflasche, integriertem Piktogramm und Spiegel • die robuste Wandbox ist im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen • die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet.

Die Augen-Notfallstation bietet eine optimale Erstversorgung wenn Schmutz- und Schadstoffe in das ungeschützte Auge gelangen, mit der 200 ml-Flasche pH Neutral werden Säuren und Alkali bereits in wenigen Sekunden neutralisiert.

**ANWENDUNG:** Die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen; im Anschluss daran kann eine Fortsetzung der Spülung mit der 500 ml-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung erfolgen; die 500 ml-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter, verwendet.


**GRÖSSE:** Breite 230 mm, Höhe 280 mm, Tiefe 110 mm

### NORM

zertifiziert nach:

EN 15154-4

*Lieferung inkl. Augen-Notfallplan: Hier sind die Anwendungshinweise klar und deutlich beschrieben, sodass eine schnelle und einfache Anwendung bei Augenunfällen möglich ist.*

	ART.-NR.
	KO-113